

Datum:	09.11.15
ErstellerIn:	St.Gschwind
Seite:	1 von 1
Version:	V2 / 24.11.15
Datei:	Patientenruf-Funksets Arbeitsanweisung.docx

Patientenruf – Funkset (Modell Eldat)

Für die Verwendung der Patientenruf – Funksets bitte folgende Bedingungen beachten und einhalten:

Das System ist nur für die Benutzung als zusätzliche Rufmöglichkeit innerhalb von Patientenzimmern vorgesehen und einzusetzen.

Die Funktion des Funkset ist nur innerhalb der Patienten Zimmer gewährleistet.

Wird über den Funksender ein Ruf ausgelöst, wird als Ruftext auf den Displays der Patientenrufanlage, immer nur als Ort der Bettenplatz (zB 2832.F) angezeigt wo der Empfänger eingesteckt wurde.

Es ist darauf zu achten, dass die Sets nicht untereinander vermischt werden. Sender und Empfänger funktionieren nur jeweils mit der entsprechenden Set-Nummer zusammen.

Installation des Funksets:


- Den Halter mit Empfänger und Y-Verteiler hinter dem Bett an der Medienschiene einhängen.
- Das Netzteil an einer Steckdose 230V einstecken. Kontrolle ob LED am Netzteil leuchtet.
- Das Patientenrufkabel des Y-Verteilers an einer Patientenrufsteckdose im Medienkanal über dem Bett einstecken.
- Das Birntasterkabel des Patienten für das Bett, kann im freien Steckplatz am Y-Verteiler eingesteckt werden.

Nach der Installation ist unbedingt ein Testruf durchzuführen!

Zu jeder Rufauslösung blinkt am Sender und Empfänger kurz je eine LED rot auf.

Umfang eines Funksets:

- Lager und Transportbox
- ① Empfänger (montiert auf ④ Halter)
- ② Y-Verteiler (montiert auf ④ Halter)
- ③ Sender (Uhrmodel)

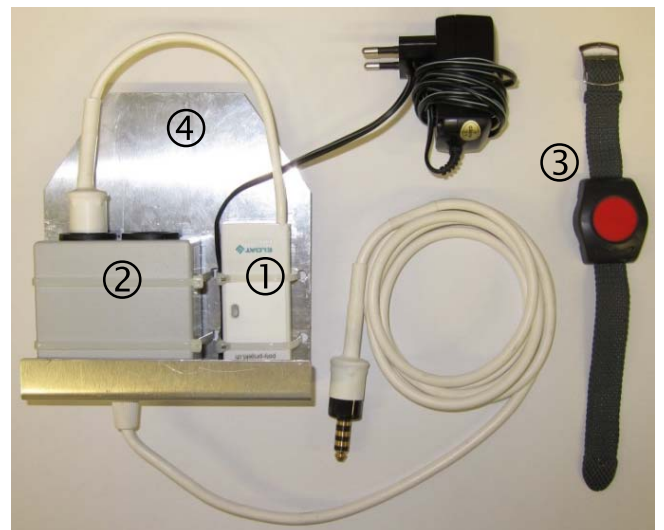

Support bei Fragen oder Problemen:

Mo-Fr 07:00-17:00 unter Tel 87472 oder 53051

Defektes Material kann unter den oben genannten Zeiten in der Elektrowerkstatt (VELF 1.UG) umgetauscht werden. Bitte dazu immer komplette Sets vorbeibringen.