

Sicherer Infusionsständer – Fotoanleitung

Stolper- und Kippgefahr minimieren – Stürze verhindern

Infusionsständer **Fresenius**. Hier mit zwei Geräten




Geräte möglichst niedrig:
Schwerpunkt soll zentral
und so tief wie möglich liegen

Wegen Stolpergefahr:
Schiebegriff anbringen,
gerade über einem Fuss ausrichten,
nicht zwischen zwei Füßen

Wegen Umsturzsrisiko:
Schiebegriff auf der gegenüberliegenden
Seite zu den Geräten anbringen

Geräte gerade über dem blauen
Querbalken ausrichten, nicht seitlich
verdreh

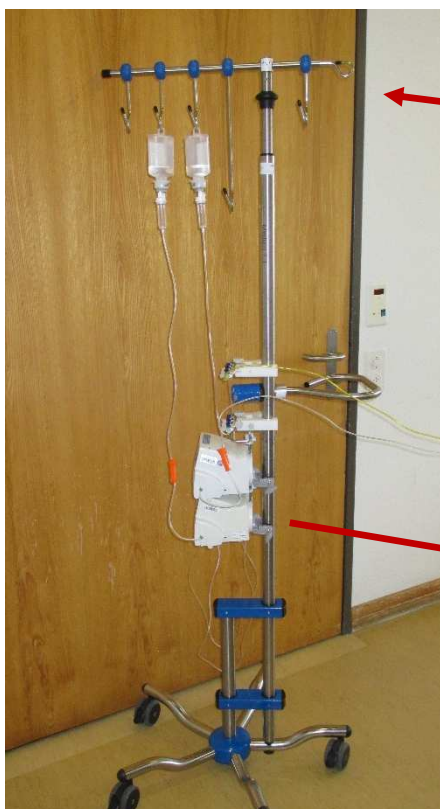

Infusionshaken gegenüber vom Patienten:
gerade über den Geräten ausrichten,
gegenüber vom Schiebegriff



Dockingstation Duo
(optional):
Nur ein Kabel für zwei
Geräte nötig