

Sicherer Infusionsständer – Fotoanleitung

Stolper- und Kippgefahr minimieren – Stürze verhindern

Infusionsständer **Hess** mit zwei Geräten. Hier ohne Hahnbank.



Geräte möglichst niedrig:
Schwerpunkt soll zentral und so tief wie möglich liegen
Geräte bei Bedarf etwas höher und Griff dazwischen anbringen, z.B. für sehr kleine Personen



Wegen Stolpergefahr:
Schiebegriff anbringen, gerade über einem Fuss ausrichten, nicht zwischen zwei Füßen

Wegen Umsturfrisiko:
Schiebegriff auf der gegenüberliegenden Seite zu den Geräten anbringen

Geräte gerade ausrichten, nicht seitlich verdreht



Urinbeutelhalter für Ableitungen (Urinbeutel, Redon und andere Drainagen) verwenden.
Einfach auf die gewünschte Seite drehen.
Ist durch seine Konstruktionsweise auf der richtigen Höhe fixiert.



Dockingstation Duo (optional)
Nur ein Kabel für zwei Geräte nötig